


1. Tag en FerleCheck ud af røret.
2. Dyp strippen i urinen så alle felterne berøres, og tag den øjeblikkeligt op igen.
3. Placer stikken på en plan overflade med testfelterne opad.
4. Sammenlign farverne på strippen med farveskemaet på røret.

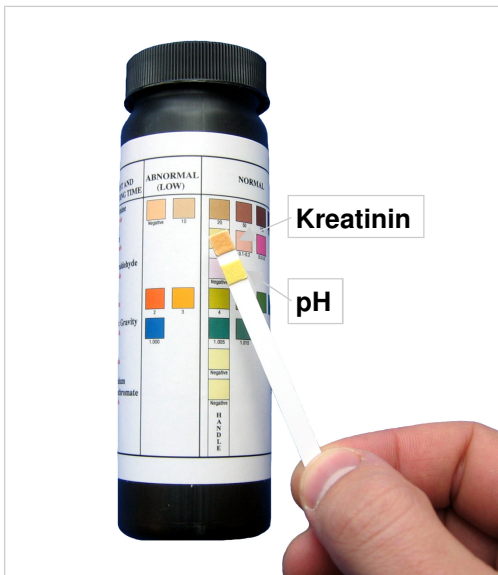

Kreatinin

En substans som dannes i kroppen i forbindelse med musklernes arbejde. Jo lavere kreatininindholdet er i urinen, jo større sandsynlighed er der for at urinen er blevet manipuleret med. Værdier indenfor Abnormal (low), indikerer at urinen er fortyndet.

pH

Værdier uden for normal interval, indikerer at der kan være manipuleret med urinen.

OBS! Holdbarheden er ca. 3 måneder efter åbning!