


Brugsanvisning Ferle Saliva narkotikatest

Prøveindsamling

Der må ikke indtages mad, drikke, tobak eller tyggegummi 10 minutter før prøveindsamling.

1. Pak test og indsamler ud af de forseglede indpakninger.
2. Før indsamleren rundt i munden og på tungen i mindst 3 minutter. Prøven er klar når hele svampen på indsamleren er gennemvædet.

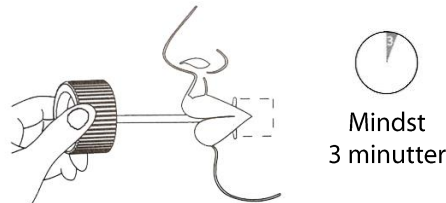

3. Indsæt indsamleren i testbeholderen og skru den fast.



4. Hiv den orange label af testbeholderen og aflæs resultaterne indenfor 3-10 minutter. Hvis alle streger er tydelige efter 3 minutter, eller før, kan resultaterne tolkes som værende negative. Hvis en eller flere streger ikke er synlige efter 3 minutter, skal testen først aflæses efter 10 minutter.



5. **Aflæsning af resultater:**

