


1. Tag testen ud af forpakningen. Vær opmærksom på at testen har stuetemperatur og at holdbarhedsdatoen ikke er overskredet. Udfyld evt. feltet ID og dato. Fjern den aftagelige plastichætte.

2. Dyp halvdelen af teststrimlernes længde i urinen. Hold teststrimlerne nede indtil urinen begynder at sive op i alle felterne ovenfor. Tag testen op når urinen er nået til linjen T i alle felter. Placér testpladen på et plant underlag.

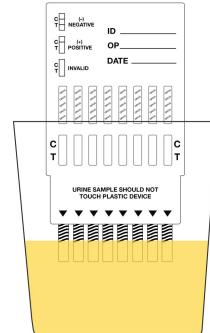

### 3. Sådan aflæses testen:


Start aflæsningen efter 3 min. Hvis alle streger er fremkommet efter 3 min, kan aflæsningen afsluttes. Men hvis en eller flere streger ikke er fremkommet, vent da 10 min med at aflæse. Hvis der ikke er fremkommet teststreg(er) (T) efter 10 min er testen positiv. Aflæs ikke resultatet efter 10 minutter.

Inden en test aflæses, skal man sikre sig at kontrolstregen (C) er fremkommet, er den ikke synlig må testen ikke anvendes. Kontrolstregen viser, at testen er korrekt udført og at den rette mængde urin er tilført.

**Negativ:** både kontrolstreg (C) og teststreg (T) skal være synlig i aflæsningsfeltet.

**Positiv:** kun kontrolstregen (C) er synlig i aflæsningsfeltet.

Teststregerne kan være mere eller mindre klare i forhold til hinanden. Nogle streger fremkommer hurtigere end andre. Mindste antydning af en teststreg skal tolkes som et negativt resultat.

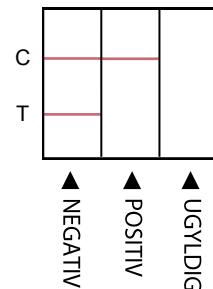


### Forkortelser

THC = Cannabis OPI = Opiater AMP = Amfetamin COC = Kokain MTD = Metadon MET = Metamfetamin  
KET = Ketamin OXY = Oxykodon PPX = Dextropropoxyfen TRA = Tramadol TML = Tramadol OPI2000 = Opiater  
FTY = Fentanyl FYL = Fentanyl BUP = Buprenorfvin EDDP = Metadon metabolit MPD = Methylphenidat  
BZO = Benzodiazepiner PGB = Pregabalins 7-ACL = Clonazepam ZOP = Zopiklon ETG = Alkohol metabolit

- Tag testen ud af forpakningen. Vær opmærksom på at testen har stuetemperatur og at holdbarhedsdatoen ikke er overskredet. Udfyld evt. feltet ID og dato. Fjern den aftagelige plastichætte.

- Dyp halvdelen af teststrimlernes længde i urinen. Hold teststrimlerne nede indtil urinen begynder at sive op i alle felterne ovenfor. Tag testen op når urinen er nået til linjen (T) i alle felter. Placér testpladen på et plant underlag.

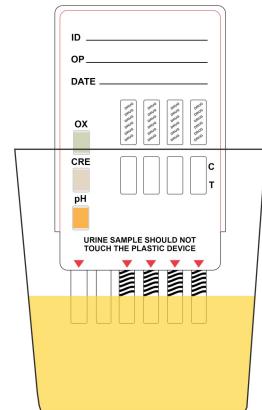

### 3. Sådan aflæses testen:


Start aflæsningen efter 3 min. Hvis alle streger er fremkommet efter 3 min, kan aflæsningen afsluttes. Men hvis en eller flere streger ikke er fremkommet, vent da 10 min med at aflæse. Hvis der ikke er fremkommet teststreg(er) (T) efter 10 min er testen positiv. Aflæs ikke resultatet efter 10 minutter.

Inden en test aflæses, skal man sikre sig at kontrolstregen (C) er fremkommet, er den ikke synlig må testen ikke anvendes. Kontrolstregen viser, at testen er korrekt udført og at den rette mængde urin er tilført.

**Negativ:** både kontrolstreg (C) og teststreg (T) skal være synlig i aflæsningsfeltet.


**Positiv:** kun kontrolstregen (C) er synlig i aflæsningsfeltet.

Teststregerne kan være mere eller mindre klare i forhold til hinanden. Nogle streger fremkommer hurtigere end andre. Mindste antydning af en teststreg skal tolkes som et negativt resultat.

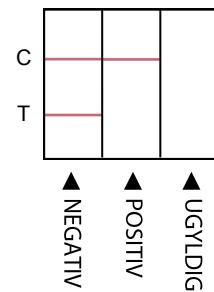

### Manipulationskontrol - pH, Kreatinin & Oxidanter


- Vend testen for at aflæse pH, Kreatinin & Oxidanter. Aflæs resultatet mod farveskemaet.

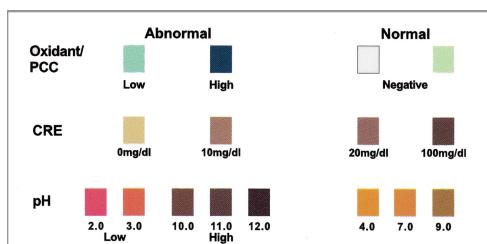

### Forkortelser:

AMP = Amfetamin THC = Cannabis BZO = Benzodiazepiner OPI = Opialer COC = Kokain OXY = Oxycodon MDMA = Ecstasy MET = Metamfetamin MTD = Metadon BUP = Buprenorphine TRA = Tramadol

- Tag testen ud af forpakningen. Vær opmærksom på at testen har stuetemperatur og at holdbarhedsdatoen ikke er overskredet. Udfyld evt. feltet ID og dato. Fjern den aftagelige plastichætte.

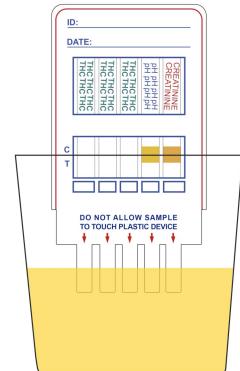

- Dyp halvdelen af teststrimlernes længde i urinen. Hold teststrimlerne nede indtil urinen begynder at sive op i alle felterne ovenfor. Tag testen op når urinen er nået til linjen T i alle felter. Placér testpladen på et plant underlag.

### Manipulationskontrol - pH & Kreatinin

- Aflæs resultatet mod farveskemaet. →

HIGH	pH	Creatinine	Ferle- Produkter
LOW	[Color Scale: Dark Blue]	[Color Scale: Brown]	AB
NORMAL	[Color Scale: Green]	[Color Scale: Tan]	
	[Color Scale: Orange]	[Color Scale: Light Brown]	

### 3. Sådan aflæses testen


Start aflæsningen efter 3 min. Hvis alle streger er fremkommet efter 3 min, kan aflæsningen afsluttes. Men hvis en eller flere streger ikke er fremkommet, vent da 10 min med at aflæse. Hvis der ikke er fremkommet teststreg(er) (T) efter 10 min er testen positiv. Aflæs ikke resultatet efter 10 minutter.

Inden en test aflæses, skal man sikre sig at kontrolstregen (C) er fremkommet, er den ikke synlig må testen ikke anvendes. Kontrolstregen viser, at testen er korrekt udført og at den rette mængde urin er tilført.

**Negativ:** både kontrolstreg (C) og teststreg (T) skal være synlig i aflæsningsfeltet (se billede)

**Positiv:** kun kontrolstregen (C) er synlig i aflæsningsfeltet (se billede)

Teststregerne kan være mere eller mindre klare i forhold til hinanden. Nogle streger fremkommer hurtigere end andre. Mindste antydning af en teststreg skal tolkes som et negativt resultat.

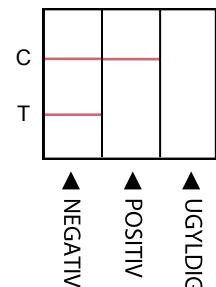


**1.** Tag teststrippen ud af forpakningen (vær opmærksom på, at testen har stuetemperatur og at udløbsdatoen ikke er overskredet, inden forpakningen brydes).

**2.** Hold testen 1 cm ned i urinen og vent på at urinen begynder at trække op over filteret.

**3.** Placer testen på en plan overflade.

Resultatet kan aflæses efter ca. 3 min. Vent ikke mere end 10 minutter inden resultatet aflæses.

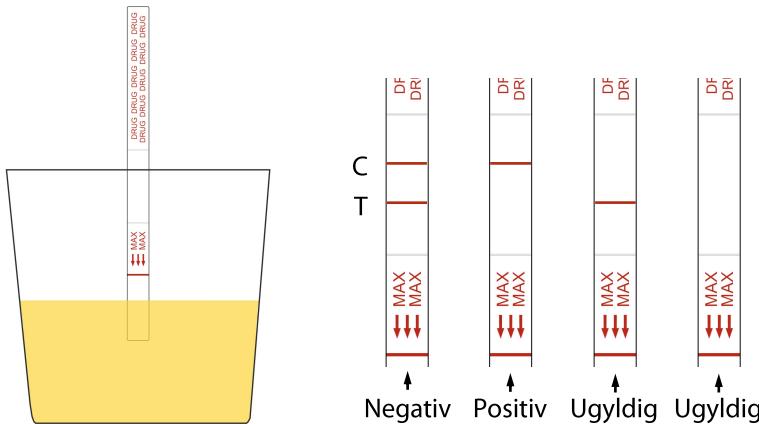

### Sådan aflæses testen:

Inden en test aflæses, skal man sikre sig at kontrolstregen (C) er fremkommet, er den ikke synlig må testen ikke anvendes. Kontrolstregen viser, at testen er korrekt udført og at den rette mængde væske er tilført pladen.



**Negativ:** både kontrolstregen (C) og teststreg (T) skal være synlig i aflæsningsfeltet.

**Positiv:** kun kontrolstregen (C) er synlig i aflæsningsfeltet.

Teststregen (T) kan være mere eller mindre intensiv i forhold til kontrolstregen (C). Mindste antydning af en streg i testfeltet (T) skal tolkes som et negativt resultat.

- 1.** Tag teststrippen ud af forpakningen (vær opmærksom på, at testen har stuetemperatur og at udløbsdatoen ikke er overskredet, inden forpakningen brydes).
- 2.** Hold testen 1 cm ned i urinen og vent på at urinen begynder at trække op over filteret.
- 3.** Placer testen på en plan overflade.

**Vent ikke mere end 5 minutter før resultatet aflæses.**

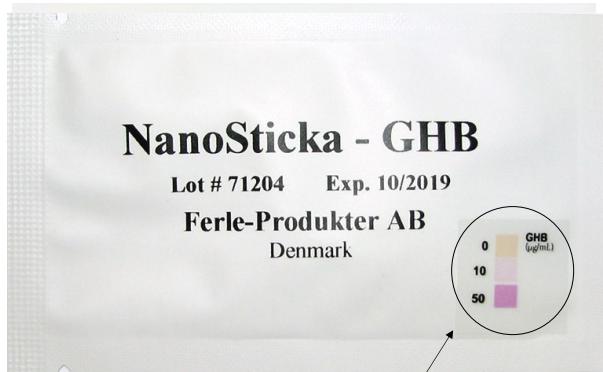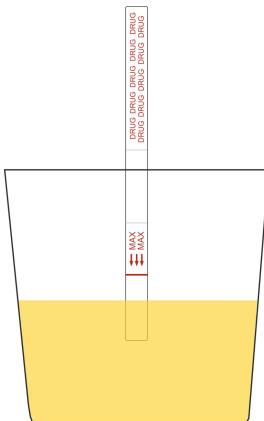

### **Sådan aflæses testen:**

Denne test aflæses ved hjælp af farveskalaen som på pakken.

#### **Negativ**

Ved negativt resultat, vil farven vise 0 på farveskalaen.

#### **Positiv**

Ved positivt resultat, viser farven 10 eller 50 på farveskalaen.